

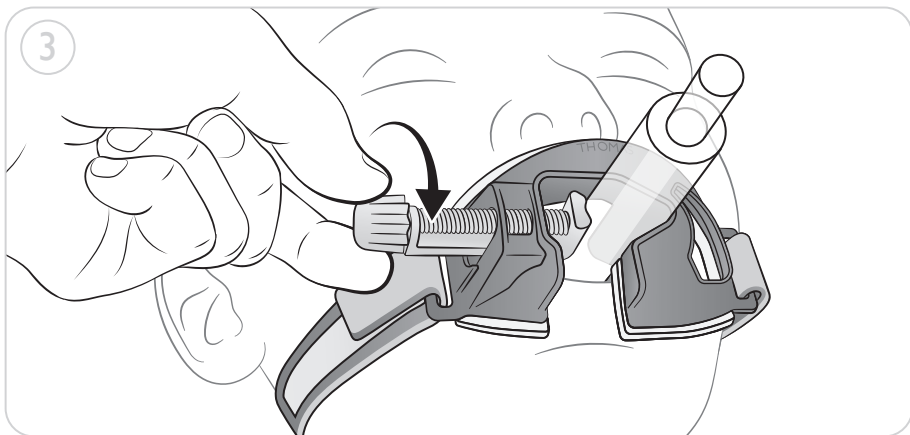


# Thomas Tube Holder - Pediatriczny

Instrukcja Obsługi

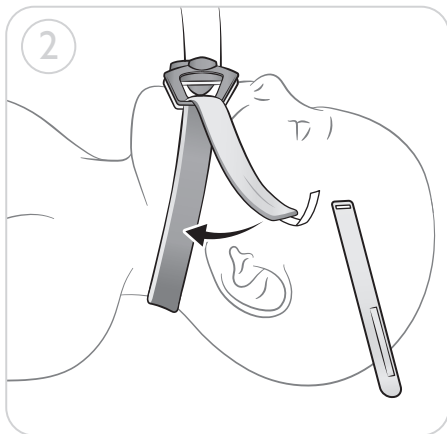

Rozm. 2 - 3

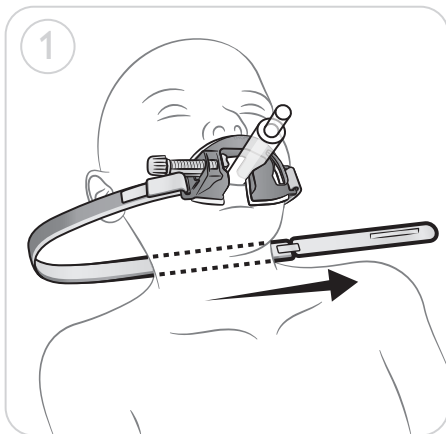

> 8 years

Rx ONLY

REF

600-20000

LATEX



4.3 - 15.8 mm



-34° C to +52° C  
(-30° F to +124° F)

CE





MD




**Laerdal**  
helping save lives


A

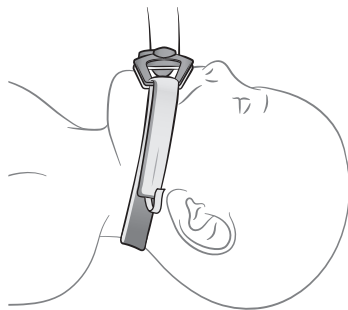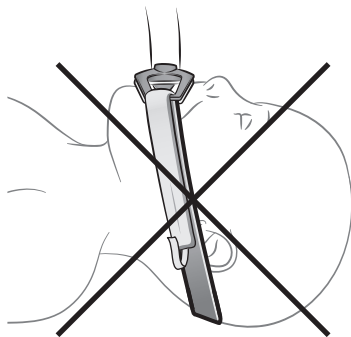

B

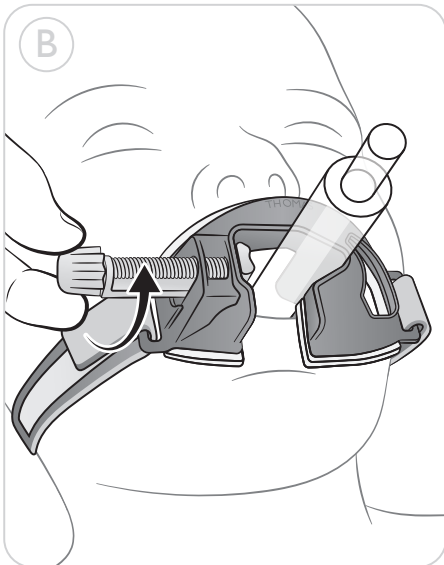

C

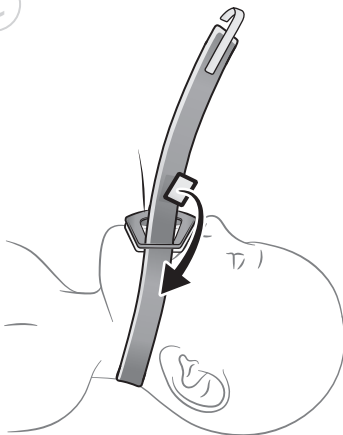

## Wskazówki dotyczące stosowania

Uchwyt Thomas do rurek służy do zabezpieczenia jedno- oraz dwukanałowych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych, takich jak np. rurki dotchawicze (ET), maski krtańowe (LMA) i inne przyrządy nadgłośniowe (SGA), po wprowadzeniu ich do tchawicy lub przełyku, w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowej ekstubacji. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów poniżej 8. roku życia wymagających krótkoterminowej (nieprzekraczającej 24 godzin) intubacji.

## Instrukcje konfiguracji

- Zamocować produkt zgodnie z ilustracjami (rys. 1–3).
- Zapewnić właściwe ułożenie paska, aby zapobiec jego ześlizgnięciu (rys. A).
- Zwolnić zacisk rurki, jak pokazano na ilustracji (rys. B).
- W razie potrzeby zamocować na pasku zdejmowany zaczepek, aby dopasować pasek do mniejszego obwodu szyi (rys. C).

 Uwagi

Ważne informacje dotyczące produktu lub jego obsługi.

- *Uchwyt Thomas do rurek spełnia wymogi następujących norm: EN 1789, ISO 13485, ISO 14971, ISO 10993-1.*
- *Wyrób niesterylny*

 Ostrzeżenia

Ostrzeżenie dotyczy sytuacji, zagrożenia lub niebezpiecznego działania, które może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.












- *Urządzenie może być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i zgodnie z instrukcją obsługi.*
- *Rurkę należy docisnąć na tyle mocno, aby zabezpieczyć jej położenie. Nadmierne dokręcenie śruby może ograniczyć przepływ powietrza.*
- *Nie stosować u dzieci w wieku 8 lat i starszych.*
- *Przeznaczony do użytku u jednego pacjenta. Nie używać ponownie. Ponowne użycie doprowadzi do wzrostu zagrożenia zakażeniem krzyżowym, pogorszenia wydajności i/lub wadliwego działania urządzenia. Firma Laerdal nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ponownego użycia.*
- *Przed użyciem należy dokonać oględzin wszystkich części, sprawdzając, czy nie są uszkodzone i czy działają prawidłowo.*
- *Podczas stosowania produktu pacjent musi podlegać stałej obserwacji.*

 Przestrogi

Przeostrogą dotyczy sytuacji, zagrożenia lub niebezpiecznego działania, które może prowadzić do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia uchwytu Thomas do rurek.

- *Urządzenie można zastosować u pacjenta wyłącznie po uprzednim wprowadzeniu zaawansowanego przyrządu udrażniającego drogi oddechowe.*
- *Nie należy stosować u pacjenta urządzenia, które było już używane w celach szkoleniowych.*
- *Produktu nie należy dezynfekować ani sterylizować.*
- *Urządzenie można stosować tylko krótkoterminowo. Po 24 godzinach należy je usunąć.*
- *Temperatura przechowywania: od -34°C do +52°C.*
- *Temperatura robocza: od -18°C do +43°C.*

## Glosariusz symboli

	Ten wyrób medyczny jest zgodny z ogólnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i jakości działania podanymi w Rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.
	Ostrzeżenie: Przepisy federalne (USA) zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub z przepisu lekarza bądź specjalisty o odpowiednich uprawnieniach.
	Do użytku u jednego pacjenta. Nie używać ponownie.
	Referencyjny numer zamówienia
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Wyrób medyczny
	Nie do użytku u dzieci powyżej 8. roku życia
	Temperatura przechowywania (maksymalna i minimalna)
	Zakres rozmiarów dla przyrządów nadgłośniowych
	Zakres rozmiarów dla rurek dotchawiczych (średnica zewnętrzna)
	Nie wykonano z naturalnej gumy lateksowej

## Materiały

Część	Materiał
Pianka	Pianka polietylenowa – PE
Pasek	Pianka poliuretanowa – PU Flaneta poliestrowa – PET Poliamid – PA
Ustnik	Polipropylen – PP
Inne elementy	Polioksymetylen – POM

Wykorzystanych materiałów nie poddawano testom palności.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi procedurami.

Uchwyt Thomas do rurek intubacyjnych jest chroniony patentem amerykańskim nr 8,360,063 i innymi patentami międzynarodowymi. Thomas i Laerdal to znaki towarowe należące do firmy Laerdal Medical AS. Prawo własności i wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja globalna: [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)

© 2021 Laerdal Medical AS, All rights reserved.

Manufactured in China for:  
Laerdal Medical AS  
PO. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
(+47) 51 51 17 00

Distributed in the USA by:  
Laerdal Medical Corporation  
167 Myers Corners Road  
Wappingers Falls, NY 12590  
(877) 523-7325

Printed in China

5219 Rev M

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives