


www.escape-mobility.com  
info@escape-mobility.com

1. Wyjmij materac Escape-Mattress<sup>®</sup> z torby do przechowywania i umieść go na podłożu.



2. Rozłóż materac Escape-Mattress<sup>®</sup> jednocześnie odpinając pas bezpieczeństwa, który utrzymuje materac w złożonej pozycji. Po rozłożeniu otwórz pozostałe pasy bezpieczeństwa.

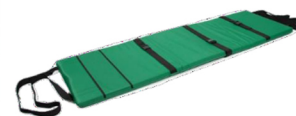

3. Umieść regulowany zagłówek na paskach zapinanych na rzepy po obu stronach głowy (linia ekonomiczna).



4. Umieść osobę ewakuowaną na materacu Escape-Mattress<sup>®</sup>. Upewnij się, że głowa osoby znajduje się na adaptowalnym zagłówku (zdjęcie po lewej) lub na szerokim zielonym pasku (zdjęcie po prawej).



5. Umieść stopy osoby ewakuowanej w worku na stopy.



6. (Zamknij klapy - jeśli są), zapnij pasy bezpieczeństwa na klatce piersiowej oraz górnej części nóg osoby ewakuowanej.



**UWAGA:** Upewnij się, że ramiona osoby ewakuowanej nie wystają poza krawędzie materaca.

7. Osoba ewakuowana może zostać przetransportowana w bezpieczne miejsce przy użyciu pasów holowniczych umieszczonych po stronie głowy i stóp. Firma Escape Mobility Company zaleca, aby ewakuację z użyciem materaca Escape-Mattress<sup>®</sup> zawsze przeprowadzały dwie osoby.



**UWAGA:** Materac Escape-Mattress<sup>®</sup> może być używany wyłącznie jako materac holowniczy. Maksymalna dopuszczalna masa holowania wynosi 150 kg.

8. Odepnij pasy bezpieczeństwa i pomóż osobie ewakuowanej opuścić materac Escape-Mattress®
9. Przed przechowywaniem zawsze sprawdź materac Escape-Mattress® pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
10. W razie potrzeby oczyść i zdezynfekuj materac przy użyciu wody oraz mydła dezynfekującego.
11. Umieść Escape-Mattress® z powrotem w wyznaczonym miejscu.

**UWAGA:**

Materace ewakuacyjne / poduszki ewakuacyjne Escape-Mattress® mogą być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone.  
Nie używaj materaca, jeśli jest uszkodzony.  
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w karcie Escape-Sheet, chyba że zostaną one wykonane przez firmę Escape Mobility Company.  
Nie wyrzucaj niniejszej instrukcji obsługi.